
Weiton®-Acrybond CE

Verarbeitungsanleitung

Haftvermittler



Johannes I **Weithas**
dental-kunststoffe • zähne

Material

Weiton®-Acrybond ist ein Haftvermittler auf der Basis von Methylmethacrylaten in Form von Flüssigkeit.

Anwendungsbereich

Weiton®-Acrybond Haftvermittler für Kunststoffzähne dient zur besseren Verbindung der hochvernetzten Kunststoffzähne mit Heiß- und Kaltpolymerisaten. Farbe: Klar

Vorteile und Eigenschaften

Weiton®-Acrybond Haftvermittler garantiert eine optimale Verbindung der hochvernetzten Kunststoffzähne mit den jeweiligen Basiskunststoffen bei schneller und einfacher Verwendung.

Lieferform

Glasflasche mit 100 ccm Inhalt.

Verarbeitungshinweis

Die Zähne werden in gewohnter Weise aufgestellt und eingebettet. Ein leichtes Aufrauen der Basalflächen bei den Kunststoffzähnen erhöht die Adhäsion. Die Reste von Wachs und Isolierung müssen sorgfältig beseitigt werden. Bevor die Kuvette mit Kunststoff gefüllt ist, sollte die Oberfläche der Zähne mit Weiton®-Acrybond befeuchtet werden. Für eine optimale Verbindung wird empfohlen, die Oberfläche ca. 5 Minuten befeuchtet zu lassen. Sollte sich Weiton®-Acrybond zu schnell verflüchtigen, so muss es noch einmal aufgetragen werden. Weiton®-Acrybond kann einfach mit einem Wattestäbchen aufgetragen werden.

Sicherheitsratschläge und Gefahrenhinweise

Bitte Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten. Alle Sicherheitsdatenblätter finden Sie auch im Internet unter www.weithas.de.

Hersteller Hinweis

Die Beratung über die Anwendung der von uns gelieferten Produkte, ob mündlich, schriftlich oder durch Demonstration, erfolgt nach bestem Wissen und ist als unverbindlicher Hinweis zu betrachten. Sie entbindet den Benutzer nicht von der Pflicht, die Produkte persönlich auf Qualität, Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Der Einsatz und die Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrolle und liegen somit in der Verantwortung des Verwenders. Unsere Haftung beschränkt sich nur auf die Qualität des verarbeiteten Materials. Die Behältnisse sind nach Gebrauch umgehend wieder zu verschließen.

Kontakt

Für die Beantwortung von Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Johannes I **Weithas** dental-kunststoffe • zähne

Johannes Weithas GmbH & Co. KG
Gartenstraße 6
24321 Lütjenburg

Telefon: +49 (43 81) 43 39
Telefax: +49 (43 81) 43 69

E-Mail: info@weithas.de
Internet: www.weithas.de