

---

# Weiton<sup>®</sup>-Alginatelöser

Verarbeitungsanleitung

---

Konzentrat, 1 : 10 verdünnbar



Johannes I **Weithas**  
dental-kunststoffe • zähne

**Material/ Indikation**

Zur selbsttätigen Reinigung mit Korrosionsschutz von Abdrucklöffeln, Anrührbechern und Instrumenten.

**Mischungsverhältnis**

Pur oder mit Wasser bis max. 1 : 10

1.

**Anwendung**

Schnellere Alginatauflösung durch Erwärmung auf ca. 40 °C Löffel in Lösung legen bis Reste sich durch Bürsten leicht lösen. Je nach Alginatsorte zwischen 30 und 100 Minuten. Löffel anschließend mit Wasser abspülen.

**Lieferform**

Flasche mit 1000 ml oder Kanister mit 5000 ml Inhalt.

**Sicherheitsratschläge und Gefahrenhinweise**

Bitte Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten. Alle Sicherheitsdatenblätter finden Sie auch im Internet unter [www.weithas.de](http://www.weithas.de).

**Hersteller Hinweis**

Die Beratung über die Anwendung der von uns gelieferten Produkte, ob mündlich, schriftlich oder durch Demonstration, erfolgt nach bestem Wissen und ist als unverbindlicher Hinweis zu betrachten. Sie entbindet den Benutzer nicht von der Pflicht, die Produkte persönlich auf Qualität, Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Der Einsatz und die Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrolle und liegen somit in der Verantwortung des Verwenders. Unsere Haftung beschränkt sich nur auf die Qualität des verarbeiteten Materials. Die Behältnisse sind nach Gebrauch umgehend wieder zu verschließen.

**Kontakt**

Für die Beantwortung von Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

**Johannes I Weithas**  
dental-kunststoffe • zähne

Johannes Weithas GmbH & Co. KG  
Gartenstraße 6  
24321 Lütjenburg

Telefon: +49 (43 81) 43 39  
Telefax: +49 (43 81) 43 69

E-Mail: [info@weithas.de](mailto:info@weithas.de)  
Internet: [www.weithas.de](http://www.weithas.de)