
Yamahachi Wax-Disk

Verarbeitungsanleitung

CAD/CAM Fräsblanks \varnothing 98,5 mm in 14/20 mm Dicke
CAD/CAM Fräsblanks \varnothing 95 mm in 20 mm Dicke
CAD/CAM Fräsblanks \varnothing 101 mm in 20 mm Dicke



Material

Wachs-Fräsröhring für die Herstellung von rückstandsfrei verbrennbaren Wachsmodellen

Die Blanks aus hochwertigem, synthetischem Wachs sind optimal für die Herstellung von Kronen und Brücken in der Gusstechnik sowie für die Überpresstechnik in Keramiksystemen. Die spezielle Rezeptur der Wachs Disks garantiert eine hohe Kantenstabilität und saubere Spanbildung.

Hersteller:

YAMAHACHI DENTAL MFG., Co.
54-1 Ochigara Nishiura-cho Gamagori-city
Aichi Pref., Japan
Tel. +81-533-57-7121 bzw. 8519
Fax. +81-533-57-1764

Indikation

Fräsröhrlinge für

- die Herstellung von Kronen und Brücken in der Gusstechnik
- sowie zum Einsatz in der Überpresstechnik in Keramiksystemen

WICHTIGER HINWEIS:

Bei den Yamahachi Wax-Disks handelt es sich NICHT um ein Medizinprodukt – sie sind nur für den extraoralen Einsatz zugelassen.

Verarbeitung

- Setzen Sie den Fräsröhring gemäß Herstellerangaben in Ihr CAD/CAM System ein
- Nehmen Sie die gerätespezifischen Materialeinstellungen vor
- Führen Sie den Fräsvorgang aus

Verarbeitungshinweise

- Verwenden Sie CAD/CAM Systeme, für die der jeweilige Disk Typ zugelassen sind.
- Befolgen Sie die Verarbeitungshinweise Ihres CAD/CAM Systems.
- Lassen Sie mindestens 0,5 mm Abstand in den Randbereichen.
- Halten Sie die Hohlräume rund.
- Lassen Sie mindestens 1.0 mm Schichtstärke an Fissuren und Einbuchtungen und mindestens 1.3 mm Schichtstärke bei Zahnhöckern.
- Verwenden Sie die Yamahachi-Wax Disk nur für den vorgesehenen Anwendungsbereich.

- Das Produkt ist nur für den professionellen Einsatz geeignet.

Lieferform

Abmessungen:

- Ø 98,5 mm x 14 mm Dicke, Rohling mit Stufe/Schulter, Farbe: Dunkelgrün
- Ø 98,5 mm x 20 mm Dicke, Rohling mit Stufe/Schulter, Farbe: Dunkelgrün
- Ø 95 mm x 20 mm Dicke, Rohling z.B. passend für Zirkonzahn®, Farbe: Dunkelgrün
- Ø 101 mm Zahnbogenform x 20 mm Dicke, Rohling z.B. passend für Amann Girrbach®, Farbe: Dunkelgrün

Lagerung

Die Fräsröhrlinge stets in der unversehrten Originalverpackung lagern. Zu vermeiden sind:

- Erschütterung oder Schläge
- Lagerung über 25°C lagern
- Direktes Sonnenlicht

Hersteller Hinweis

Die Beratung über die Anwendung der von uns gelieferten Produkte, ob mündlich, schriftlich oder durch Demonstration, erfolgt nach bestem Wissen und ist als unverbindlicher Hinweis zu betrachten. Sie entbindet den Benutzer nicht von der Pflicht, die Produkte persönlich auf Qualität, Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Der Einsatz und die Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrolle und liegen somit in der Verantwortung des Verwenders. Unsere Haftung beschränkt sich nur auf die Qualität des verarbeiteten Materials.

Für die Beantwortung von Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Johannes I Weithas
dental-kunststoffe • zähne

Johannes Weithas GmbH & Co. KG
Gartenstraße 6
24321 Lütjenburg

Telefon: +49 (43 81) 43 39
Telefax: +49 (43 81) 43 69

E-Mail: info@weithas.de
Internet: www.weithas.de

Die mit © gekennzeichneten Namen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.