
Weiton[®]-Prothesenreiniger

Verarbeitungsanleitung

Konzentrierter Prothesenreiniger auf Säurebasis



Johannes I **Weithas**
dental-kunststoffe • zähne

Material/ Indikation

Weiton®-Prothesenreiniger ist ein Reiniger auf Säurebasis. Er entfernt Zemente, Zahnstein, Lötrückstände, Blut- und Gewebereste.

Mischungsverhältnis

1.	Mischung mit Wasser 1 : 1	langsame Wirkung
	Mischung pur	schnelle Wirkung

2. Verarbeitungsanweisung

Glasgefäß mit Deckel verwenden. Die zu reinigende Prothese in das Glas legen und anschließend mit Weiton®-Prothesenreiniger bedecken. Glasgefäß mit Deckel verschließen damit keine aggressiven Dämpfe austreten.

Reinigungszeit

ohne Ultraschall ca. 10 Minuten
mit Ultraschall ca. 4 Minuten
(nicht bei Keramikzähnen verwenden)

Nach Beendigung der Reinigung die Prothese mit einer Pinzette herausnehmen und unter fließendem Wasser gut abspülen. Keinen Weiton-Prothesenreiniger auf das Ultraschallgerät oder andere Metalle gelangen lassen (Rostgefahr).

Hinweis

Keine Retentionseinsätze/Friktionsringe verschiedener Verankerungssysteme der Implantattechnik mit Weiton-Prothesenreiniger reinigen, weil diese aufgelöst werden können. PEEK-Material kann ebenfalls von Weiton®-Prothesenreiniger angegriffen werden.

Entsorgung

Weiton-Prothesenreiniger ist unter Beachtung der örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

Lieferform

Flasche mit 1000 ml Inhalt.

Sicherheitsratschläge und Gefahrenhinweise

Bitte Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten. Alle Sicherheitsdatenblätter finden Sie auch im Internet unter www.weithas.de.

Hersteller Hinweis

Die Beratung über die Anwendung der von uns gelieferten Produkte, ob mündlich, schriftlich oder durch Demonstration, erfolgt nach bestem Wissen und ist als unverbindlicher Hinweis zu betrachten. Sie entbindet den Benutzer nicht von der Pflicht, die Produkte persönlich auf Qualität, Eignung und Verwendbarkeit zu

prüfen. Der Einsatz und die Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrolle und liegen somit in der Verantwortung des Verwenders. Unsere Haftung beschränkt sich nur auf die Qualität des verarbeiteten Materials. Die Behältnisse sind nach Gebrauch umgehend wieder zu verschließen.

Kontakt

Für die Beantwortung von Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Johannes I Weithas
dental-kunststoffe • zähne

Johannes Weithas GmbH & Co. KG
Gartenstraße 6
24321 Lütjenburg

Telefon: +49 (43 81) 43 39
Telefax: +49 (43 81) 43 69

E-Mail: info@weithas.de
Internet: www.weithas.de